

<デンタルショーリポート> 第5回ワールドデンタルショー 2006

4年に一度、国内最大級のデンタルショー『第5回ワールドデンタルショー2006』が、10月13日(金)～15日(日)の3日間にわたり横浜みなとみらい地区「パシフィコ横浜」にて(クインテッセンス出版株式会社主催)開催されました。同会場では『第5回日本国際歯科大会』も開催され、演者である国内外の先生方をはじめ、本会にご参加の歯科医師、歯科技工士、衛生士様が来場され、会場はあたかもグローバルな動向を体感できる歯科医療業界のメッカと化しました。



デンタルショー会場では200を超える国内外のメーカーが、展示ブースのディスプレイ、演出に趣向を凝らしており、今回は、今まで以上に大型液晶ディスプレイを使って動画映像・高画質画像を用いて説明、紹介する姿が目立ちました。これは、もちろんデジタル機器等の発達が原因の一端を担っておりますが、先生方にとって解かり易く、適切で正確な情報をきちんとお伝えしたい！という展示者側の想いだと思います。特に、「歯科用CT」「CAD/CAM」の


進化は目を見張るものがあり、今回、国内外の最先端機器が各メーカーより次々と発表されたことにより、選択肢も増え、導入される先生方が今後益々増えることと思います。

また、(株)ヨシダのユニット展示エリアでは、コンセプト製品として製造した(販売予定なし)折り畳みが可能なユニット、可動式のキャビネットを使ってパフォーマンス実演を行い、歯科医療空間の新しい創り方を提案し、その斬新なアイデアに多くの先生方が驚きと関心の声をあげてられていました。

(株)ビーブランド・メディコーデンタルでは、新発売商品『シロティ&ビーポリッシュ』が、デザインのかawaiiさと手軽にできるホームケア審美用品ということもあり常時、沢山の人がかりでした。研磨剤の形状に丸みを持たせ歯面保護を重視し、フッ素配合率も非常に高いので、初心者向けホームケア用品として歯科医院の受付販売にはうってつけかもしれません。



その中で私ども〔株式会社岩瀬歯科商会〕も、小さいながらも展示ブースを出

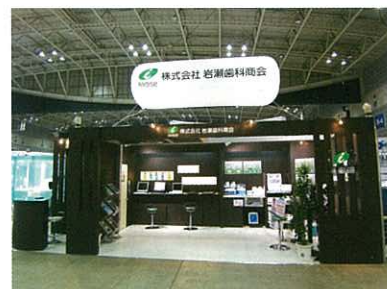

させていただきました。弊誌前号の中でもご紹介いたしましたが、『近未来型歯科医院』をメインテーマに、今後予想される歯科医療を取り巻く厳しい環境を踏まえ、先生方が想い描く歯科診療へのお手伝いをしたい(一助となりたい)・・・引いては、日本国民のQOL向上に貢献したいというイワセの熱い想いを胸に、イワセがおすすめする「近未来型歯科医院において必ずお役に立てる商品」のご説明、ご提案をさせていただきました。大きなメーカーブースの一角で埋もれてしまいそうな場所でしたが、全国各地から多くのお客様にお立ち寄りいただき、貴重なご意見等をいただくことができました。この場をお借りしてご来場いただきました方々に心より感謝申し上げます。

最後に、来場者数をご報告し、デンタルショーリポートと致します。

歯科医師14,262名、歯科技工士6,597名、歯科衛生士9,752名、学生1,989名、同伴者1,826名、業界関係者7,115名で、総数は41,541名様でした。



今号のラインナップ

1面／デンタルショーリポート

2面／新・Products・Products

3面／続報Ⅲ！カムログインプラント

4面／セミナーリポート、セミナースケジュール

5面／<連載2>今あるべき歯科医療とは？病因論とは何なのか？

6面／大掃除&機械点検大作戦

7面／大掃除&機械点検大作戦

8面／知っ得歯科医院経営

プレゼント・・・「床用おそうじ道具」

新・Products

「USB接続により、簡単接続、簡単撮影、簡単管理！」

患者さんにより安心していただくために、患者さんよりコミュニケーションを図っていただくために、株式会社ジーシーより手軽に使えるPC接続型口腔内カメラ『G-カム』が発売になりました。

デジタル化に対応するため、USB接続を採用。お手持ちのパソコンにつなぐだけで準備は完了です。パソコンの大画面を使って患者さんに説明をしながら撮影が出来ます。一時メモリは100カット。全画面表示で1カットずつ確認が出来るスライドショー機能も搭載しています。もちろん、必要な画像は、パソコンのハードディスクやネットワークドライブに直接保存できます。また、JPEG形式で保存を行うので、『デンティストフォトマネージャー2』（ジーシー）をはじめ、さまざまなPCアプリケーションソフトと連携して効果的な画像管理と患者様とのコミュニケーションが可能です。

ハンドピースはわずか25gととにかく軽く、ヘッドも11mmと薄型でかつアングルヘッドなので臼歯部遠心や頬側部へも容易にアクセスできます。さらには、白色と紫色の2色のLEDを搭載しておりケースに合わせた撮影が可能です。専用ソフト（イントラビックス）も標準装備しておりお求めやすい価格となっております。是非、インフォームドコンセントのツールとしてご活用ください！



『G-カム』
株式会社ジーシー
定価/198,000円（税抜）

「究極のシェードテイキングが可能になりました」


近年、審美歯科補綴の増加に伴い、患者さんの歯牙の色情報をより正確に簡単に測定・伝達できるツールが求められつつあります。

今回ペントロンジャパン株式会社より発売された『オリンパス クリスタルアイ』は、標準補正された「7bandLED光源45度照射のスペクトル推定方式」を採用したシェードテイキング用デジタル分光測色器です。従来の術者の視覚的比較で行っていたシェードテイキング方法とは異なり、外光に左右されない遮光条件下で撮影した歯牙の画像と、同条件で事前に測色されたシェードガイド画像との比較をPC上で瞬時に分析・表示し、その結果をシェードガイドとのスプリット比較画像、色差、明度、赤み、黄色みをわかりやすいグラフ形式で表示したラボラトリーレポート等で確認することができます。

【特長】

1. 歯牙の色情報を遮光下7bandLED光源により撮影することで、外光に影響を受けず正確かつ膨大な色情報を簡単なボタン操作で記録することができます。
2. 測色結果はPC上で瞬時に確認することができ、測色データをメディアにアウトプットしてテクニシャンへ正確に伝達することができます。
3. チェックボックス（別売）により、製作した修復物の色調と歯牙の色調の差分を事前に確認することができます。

オリンパス社の光学・画像処理技術を結集して生まれた「クリスタルアイ」は、デンティストとテクニシャンを結ぶ確かなEyeです。

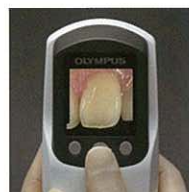

『クリスタルアイ』
ペントロンジャパン株式会社
定価/798,000円（税抜）

Products

「自然な白さが期待できます！！」

ホワイトニング材の老舗である株式会社松風からホームホワイトニング材の『松風ハイライトシェードアップ』が好評発売中です。

『松風ハイライトシェードアップ』は従来から発売されているチェアサイドで行うオフィスホワイトニング材の『松風ハイライト』とは違い、チェアタイムにとらわれず（専用マウストレイを作成する時間は必要です）、患者さんがご家庭で専用マウストレイに専用ジェルを入れ1日約2時間装着（装着期間は最長2週間）することによって、歯を白くするホームホワイトニングシステムです。主成分は過酸化尿素10%（過酸化水素3.6%相当）、『松風ハイライト』の過酸化水素35%と比較すると歯面に対してもマイルドで知覚過敏になる可能性も低く、何よりオフィスホワイトニングにありがちなチョーキーな白さではなく、透明感を無くすることなく自然な白さを期待することができます。また、『松風ハイライト』と『松風ハイライトシェードアップ』を併用するデュアルホワイトニングによって、より効果的なホワイトニングをすることが出来ます。

ホワイトニングに対するニーズは、営業や接客業の方、就職活動中の方、結婚式前のカップルなど年々高まっています。是非、お試しください。



『ハイライトシェードアップ』
株式会社松風
定価/5,800円（税抜）
※キット内容：ジェル3g/4本
シリンジック/4個
エバシェード/2本
トレーケース/1個
シェードメモ/1枚

『マスキングエージェンツ』



『リライエックスTMセラミックプライマー』



『ダンビル社製マイクロエッチャーIIブローキット』



『コジェットTMチェアサイドキャンペーンパック』
定価/78,910円（税抜）
キャンペーン期間/2006年12月28日(木)まで

「多くの接着の場面で効果有です！」

3M ESPEの『コジェットチェアサイドキャンペーンパック』をご紹介します。

このセットは、『コジェットTMサンド』、『リライエックスTMセラミックプライマー』、『マスキングエージェンツ』、『ダンビル社製マイクロエッチャーIIブローキット』で構成され様々な接着修復の場面で威力を発揮します。

例えば、メタルボンドの破折修復時には、

1. 露出金属面、ポーセレン面に『マイクロエッチャーII』を用いて、『コジェットTMサンド』を吹きつける。
2. 『コジェットTMサンド』を吹きつけた金属面、ポーセレン面に『リライエックスTMセラミックプライマー』を塗布し十分に乾燥。
3. 通法によりボンディング材（ワンステップタイプは不可）を塗布。金属面を『マスキングエージェンツ』でマスキングしコンポジットレジンにて修復。

以上の手順で、従来法に比べ接着力を大幅に向上させることが可能です。シリカを含有する30ミクロンの酸化アルミナ粒子である『コジェットTMサンド』を接着面にサンドブラスター処理することにより、接着面積が拡大すると同時にシランカップリング材の馴染みを向上させ、レジン接着をより強固にするのです。

この『コジェットTMサンド』を利用した接着強化システム（『コジェットTMシステム』）は、次のような症例において応用可能です。

- ・補綴物セット時のセメントとの接着強化（オールセラミック、ジルコニアなど）
- ・金属床のリベース（金属とレジン床の接着強化）
- ・咬耗による義歯の咬合調整
- ・矯正用ブラケットの接着強化
- ・磁性アタッチメントの床と磁石の接着

様々なリペアの場面でその威力を発揮する『コジェットTMシステム』がチェアサイドで簡単に導入できる『コジェットチェアサイドキャンペーンパック』を是非お試しください。

続報Ⅲ！カムログインプラント

camlog
BIOTECHNOLOGIES

「カムログインプラントは、シンプルで極めて高精度な印象採得が可能です！」

カムログインプラントの精度（インプラント～アパットメント間の回転遊びのなさ）が、簡便でしかも超精密な印象採得を可能にしました。口腔内の状態が精密に模型に再現されますので、技工サイドでより精度の高い上部構造体を追及することができます。遊びの大きなインプラントシステムでは、「とにかく出来上がった模型に入る」という上部構造体が優先されますので、適合を追求することが

難しくどうしても通常よりもセメントスペースが厚くなる場合があります。その結果、脱離の原因になったり、スクリー固定法の場合では、上部構造体を固定するスクリーに応力が集中し破折につながったりすることすら考えられます。上部構造体の適合精度は、インプラントの寿命を左右する重要な要因でもあります。カムログでは、全てのユーザーが精密にしかも簡便に印象採得を行うための

パーツを供給することは、最も重要な使命の一つとして考えています。従って、症例に応じて、オープントレー用・クローズドトレー用の両印象パーツをご用意しております。その中でも、オープントレー印象のみが大半を占める他社システムと異なり、シンプルでありながら精密な印象が可能なクローズドトレー方式を多くのカムログユーザーが愛用しています。



セミナーレポート

『チーム医療実践セミナー＜パート2＞』

～歯科医院経営のヒント～

講師：小林 祐之 先生

しのぶ歯科医院院長（富山県ご開業）

金井 美樹 先生

しのぶ歯科医院勤務・歯科衛生士

セミナー演題に「経営」という2文字が入ると、患者数やレセプト枚数・自費比率などの数字、つまり増患や収入増に関連する具体的な行動や患者説明ツールの啓蒙、又はアイデア・スクリーニング、そして患者との接し方（接遇）のセミナーと臆断しそうですが、今回は、歯科医院全体が一丸となってクライアント（患者さん）に向き合う「チーム医療構築」が必要とのお話でした。

経営者である歯科医師の先生とデンタルスタッフの皆様は、歯科医院内におけるチーム医療についてどのようにお考えですか？

チーム医療の全体像については理解していても、実際に行動に移すとなると、行く手を遮るファクターが現れ躊躇、又は頓挫して「チーム作り」「担当制」「院内活性化」などの計画が思うように先へ進まない・・・との声もお聞かいたします。

では、歯科医院内におけるチーム医療とは何か？ 歯科衛生士担当の目的

とは何か？ 歯科医師の先生を含めた、デンタルスタッフの具体的な役割や行動とは何か？

そんなお悩みを解消するヒントが、富山県でご開業の「しのぶ歯科医院」院長・小林祐之先生と同医院ご勤務の金井美樹先生から発信されました。

院内スタッフが一丸となってチーム医療をフル機能させている歯科医院は、院内ビジョンの共有化に成功しています。小林先生、金井先生の両先生には、今回、特に院内ビジョン共有のために行なうノウハウと考え方について、自医院での体験を交え分かり易く解説していただきました。また、日常症例からクライアント（患者さん）情報をマネジメントする手法（ニーズのスクリーニング）を具体例で解説。ケアベースシステムの必要性和重要性について、患者さんの全人的管理、食事指導の必要性までお話しいただきました。

医療チーム内でビジョンを共有化できると、ビジョン達成への目的が見えて

きます。目的が明確になると具体化（具現化）します。そして具体化すると行動に出ます。行動が活性化するとより良い意見が出ます。結果、個々の役割が自発的に見えてきます。その時こそ、院内の理念やビジョンなどの行動指針が具体的に動き出し、より明確な具体策もトップダウンからボトムアップへ換わり、クリニックが活性化する瞬間なのかも知れません・・・そのように感じました。



最後に、ご出席いただいたお客様の声をお届けします。「具体的で解りやすかった、参考にさせて貰うよ」「しのぶ歯科で実行していることを、あまねく、具に開示した、小林先生の器量の大きさに感服」「金井先生のような歯科衛生士を目指したい」「自分のクリニックの問題点がはっきりした」「沢山のヒントをご伝授いただき、ありがとうございます」（ご意見は一部を掲載しています）

※しのぶ歯科医院のホームページはこちらです。

<http://www.idealismile.com/index.html>

※セミナー等のお問い合わせは・・・
㈱アイ・デンタル・インフォメーション
Tel: 03-3847-4618



デンタルショー&セミナースケジュール

2007年 1月	20日（土）	Iwase	デンチャー各論コース・ストラクチャー①（松本勝利先生）	東京都	イワセ上野支店
	21日（日）				
	25日（木）	Iwase	セレクトユーザーが語るセレクト3D説明会（小池軍平先生）	宇都宮市	イワセ宇都宮支店
2月	3日（土）	Iwase	ダイレクトボンディングアドバンスコース（松本勝利先生）	宇都宮市	イワセ宇都宮支店
	4日（日）				
	17日（土）	Iwase	デンチャー各論コース・ストラクチャー②（松本勝利先生）	東京都	イワセ上野支店
	18日（日）				
3月	25日（日）	Iwase	ユニット・デジタル展示会	宇都宮市	イワセ宇都宮支店
	11日（日）		茨城デンタルショー（茨城県歯科医師会主催）	茨城県	水戸市内会場
4月	22日（日）	Iwase	デンチャー総論セミナー（松本勝利先生）	千葉市内	会場未定

連載 2



今あるべき歯科医療とは？ 病因論とは何なのか？

bright dental care aoyama

日本矯正歯科学会認定医


F O X 常任理事

その他、全国各地にて多数講演ご活躍中

代表 金子 正明 先生

前回は、『歯科の病気は“う蝕・歯周病・不正咬合”の3大疾患であり、“細菌の関与する疾患”と“力の関与する疾患”に大別される。また病気の原因として考えられる病因を病因論と考え、病因論に基づいた歯科医療をすべきだ』ということを書かせていただきました。

では、病因論に基づいた歯科医療をする場合、その3大疾患を基礎的にどのように捉え、臨床応用しているかを考えていきたいと思います。病気と言うのは、ある一つの原因から起こるものと、多くの因子が絡み合っ起こるものとに分けられます。歯科の病気の多くは多因子性疾患です。一つの原因から起こるものの病気の例が、コレラです。コレラはコレラ菌の感染によって起こります。ですから、この菌を無くす事・感染しない事がこの病気を予防することにつながります。しかし歯科の場合、細菌だけでも600種以上が存在し、その他にも不正咬合による力、口腔内の環境、生活習慣など様々なことが関与しています。このように歯科の病気は、多因子性疾患だという事実があります。これをどう診査・診断し、治療計画を立案していくかが非常に重要になります。この時に行う診査・診断・治療計画と言うのは、通常行われているものとは少しニュアンスが違います。通常の診査・診断・治療計画というのは、主に今の現状を把握するために行われます。どの歯が残るのか、どの程度の進行状況なのか、補綴設計はどうするのかなどを考えるためです。病因論を考慮して行う場合は、う蝕・歯周病・不正咬合がなぜ起こってしまったのか、どの病因が深く関与しているのか、これらの疾患がどの程度複雑に入り組んでいるのか、年齢的に問題はどこにあるのかを探し出すために行われます。もちろん探し出した後には、通常と同じように、治療計画・治療ゴールを立てて治療をしていきます。では、どのように違うのでしょうか？ 医科での診査・診断はどのように行われているか考えてみる必要があります。

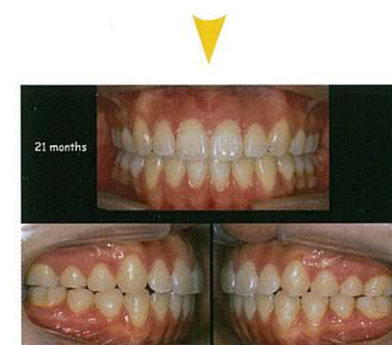

す。通常行われる検査としては、血液検査や尿検査などがあります。これはまず全体的に体に何の問題があるかを大まかに調べていきます。その後、細かい検査に入っていく最終的な診断が下されます。皆さんも人間ドックになど入って多くの検査を受けたことがあると思います。一つの病気を探し出すのに、様々な多くの検査を必要とし、更に問題点が見つかった後はCTやMRI、さらにPETなどをとって病気の進行状態を見極めていきます。このように、一つの病気を発見するまでに多くの検査が必要です。では、今の歯科の検査はどうでしょうか？ 歯科は多因子性疾患です。この多因子性疾患というのが曲者で、一つの病気に様々な原因が入り組んでいます。この絡まったパズルのような状態を解いていかなければいけません。そのためには、う蝕・歯周病・不正咬合の3大疾患がどのような原因で成り立っているかを理解し、その問題点を一つ一つクリアしていくことが重要です。ですので、病因論を考慮した診査・診断は、多くの検査が必要になります。

一つの例を示してみると、う蝕です。う蝕は“プラーク細菌の産生する酸によってエナメル質の無機質が頻りに脱灰され、唾液などによる再石灰化を上回ったときに発生する現象”です。では、どの細菌によって起こされているのでしょうか？ よくある種の細菌によって発生するようにいわれています。しかし、口腔内の細菌の70%以上が酸を産生します。こんなに多くの細菌が酸を産生するのに、ある種の細菌だけを除去しても意味がありません。細菌が酸を産生するためには、その栄養源が必要です。その栄養源はもちろん糖ですが、でんぷんも大きく関わっています。でんぷんは唾液中のアミラーゼによって糖に分解されます。でんぷんは多くの食物に含まれています。主食である米、パンなど数え上げたらきりがありません。また“唾液などによる再石灰化を上回ったときに起こる”というようにう蝕の発生には唾液の性状も大きく関わってきます。う蝕一つとってみても、食生活・唾液・細菌など多くのことを調べなければ、う蝕になった原因を突き止めることはできないのです。



まだまだこの他にも多くのことを知ることが必要です。う蝕・歯周病・不正咬合の3大疾患は口腔内で複雑に絡み合っています。これらの3大疾患を理解し、病因論を考慮した診査・診断を行い、原因を突き止めて治療をすることが、本来の医療の根本である予防を達成できると信じています。皆さんも一緒に“病因論に基づいた歯科医療”を学んでみませんか？

年末だから、大掃除&機械点検大作戦！

早いもので2006年もあと少しで終わりとなります。1年間の汚れを綺麗にするために、診療用機械のお手入れをいつもよりちょっと丁寧にしてみませんか？

また、めったに入ることのない？機械室の点検も併せてお勧め致します。別刷「きかいしつチェックリスト」にて医院状況をチェックしていただき、一つでも「YES」がある場合は、弊社担当者までご連絡下さい。


ステップ1：準備

清掃の際には、マスク、グローブ、必要に応じて保護メガネなど、適切な保護具をご使用ください。



ステップ2-1：お手入れの実施（診療機器編）

- ① 日々行っている機器のお手入れを実施します。
- ② 各メーカー指定の洗浄剤を使用し、機器の清拭をおこないます。
普段はあまり清掃することのない部分は意外に汚れていますので、念入りに。

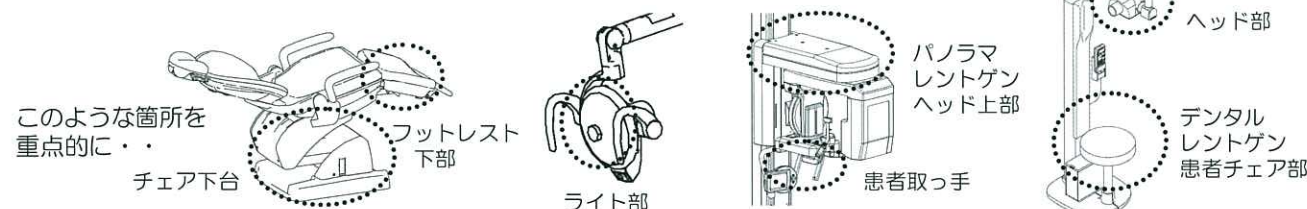

- ③ 長期休暇に入る前には、各機器をメーカー指定の状態にして電源を切ってください。
機器のパーツに負担がかからないようにするのが基本です
(例えば、油圧式ユニットチェアであれば一番下に下ろして、背板を寝かした状態にする。)

ステップ2-2：お手入れの実施（石膏トラップ編）

シンクの下に石膏トラップは便利グッズを使えば、簡単に綺麗に出来ます。



『石膏トラップ掃除3点セット』
標準販売価格／3,950円（税抜）



ステップ3：消耗品のチェック

- ① 各機器の水フィルターやエアフィルターなど、各メーカーにて定められた消耗品をチェックし、必要があれば交換してください。
- ② 特にユニット水フィルターが変色している場合には、機器の故障（水つまり）となりますので、交換をお勧めします。

★ご提案★

消耗品は1年での交換が指定されている物が多くあります。
年末に交換すると、次回の交換時期が分かりやすく便利です。
是非、この機会に交換し、新たな年を迎えてはいかがでしょうか。



水フィルターがこのような状態の場合は、交換が必要です。
イラストはヨシダ取扱いの除菌水フィルター「ユニポア」

ステップ4：機械室の点検

日頃あまり目にする事のない機械室ですが、「コンプレッサ」や「バキューム」といった診療にはなくてはならない機器が設置されています。

- ① 別刷りの『チェックリスト』を使用して、医院の状況をチェックしてみてください。
- ② 設問に対し一つでも「YES」があった場合は、イワセ担当者までご連絡下さい。
必要に応じて点検・修理させていただきます。




別刷「チェックリスト」

ステップ5（上級編）：分離器の清掃

下の「注意」欄の各項について気をつけていただき、これを機にバキュームの分離器の清掃もしてみてください。

注意

- ・必ずバキュームの電源（ブレーカ）をきる。
- ・必ずバキュームが止まったのを確認。
- ・操作盤、またはバキュームの電源ランプが消えているのを確認。
- ・グローブを必ず着用。
- ・汚れてよいタオル等を用意。
- ・床面が濡れたり水漏れが起きないようにご注意ください。

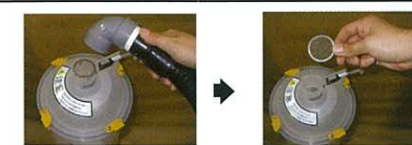


- ① 継手を外して金網を清掃します。
(古くなった歯ブラシ等が便利です！)



- ② クリップを外して蓋を本体から外し本体内部をスポンジ等で清掃します。(排水弁はつけたまま！&フロートを曲げない)



- ③ 本体内部の水が完全に排水された事を確認の上排水弁を外し、それぞれ清掃を行う。
(古くなった歯ブラシ等が便利です！)

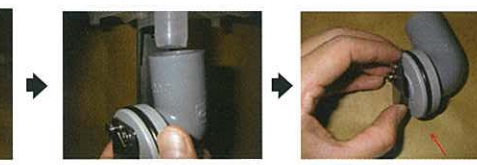


※終了後元通りに組立、接続部より水漏れの無い事を確認しユニット側にてサクションの吸引を確認します。

注意 『休暇中、医院を戸締りする際は、電気ブレーカー、水・ガス元栓の閉め忘れ など確認を！！』

ステップ6：長期休暇後に実施すべきこと

- ① 各機器の各動作確認を行います。ユニットであればチェアの上下寝起、安全装置が正常に作動するかなどをチェックしてください。
ユニットによっては、チェアの位置メモリーが消失している事がありますが、故障ではありません。
再度、メモリー設定して下さい。
- ② 休暇中にユニットに滞留していた水を抜きます。
各インスルツメント、シリンジ、コップ給水などから、念入りに水を抜いてください。

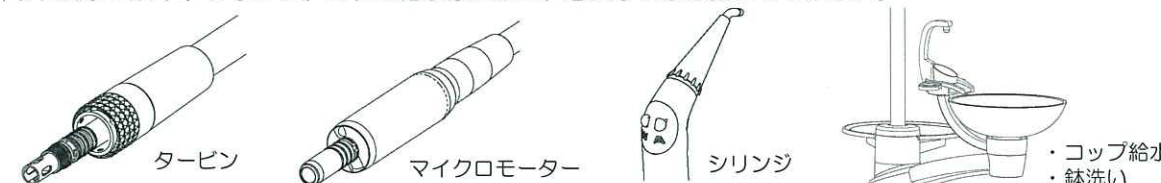

- ③ 休暇が1週間以上の場合には、インスルツメントを使用する前に必ず注油を行ってください。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業スタッフもしくはご使用機器メーカーにお問い合わせ下さい。



知っ得 歯科医院経営

有賀会計事務所 Tel:027-364-6000

<償却資産税をチェックしよう>

少額減価償却資産の損金算入の特例により、平成20年3月31日まで取得価額が30万円未満の資産を購入した場合、その全額を経費に計上できます。しかし、この特例を適用した場合、償却資産税（固定資産税）の課税対象になります。

これに対し、取得価額が10万円以上～20万円未満の資産の場合、一括償却資産の損金算入の規定の適用（但し、36ヶ月で減価償却）を受けることが出来ます。そして、この規定の適用を受けた場合には、償却資産税（固定資産税）の課税対象から除外されます。

よって、確定申告における減価償却費の計算上適用すべき税制の取扱いについては、所得税や法人税だけでなく、償却資産税も考慮し、一括償却資産の損金算入の規定の適用についても検討することをお勧めします。

【事例】

2月に1台180,000円のパソコンや機器（耐用年数4年のもの）を合計5台購入した場合の償却資産税及び所得税の税額比較

また、前年の12月31日に廃棄した資産や売却した資産について除却処理をすれば、償却資産税は課されませんので、12月31日までに償却資産の実地調査を行い、使用していない医療機器や事務機器が資産台帳に載っている場合には廃棄等を検討し、償却資産税の申告時に除却処理をすると共に廃棄済みの資産が台帳に載っていないか確認することをお勧めします。

詳しいお問合せは、有賀会計事務所へ（027-364-6000）お願いします。

		(1)少額減価償却資産の損金算入の規定の適用を受ける場合	(2)一括償却資産の損金算入の規定の適用を受ける場合
1年目	償却資産税	9,840円	0円
	減価償却費	900,000円	300,000円
	所得税(20%)	△180,000円	△60,000円
2年目	償却資産税	5,530円	0円
	減価償却費	0円	300,000円
	所得税(20%)	0円	△60,000円
3年目	償却資産税	3,108円	0円
	減価償却費	0円	300,000円
	所得税(20%)	0円	△60,000円
4年目	償却資産税	1,746円	0円
	減価償却費	0円	0円
	所得税(20%)	0円	0円
合計	償却資産税	20,224円	0円
	減価償却費	900,000円	900,000円
	所得税(20%)	△180,000円	△180,000円



各支店ご案内

本社 台東区北上野 2-3-11 TEL:03-3847-4511
 宇都宮支店 宇都宮市平出工業団地 37-6 TEL:028-613-5858
 水戸支店 水戸市白梅 2-8-18 TEL:029-225-6543
 野木支店 下都賀郡野木町丸林 384-15 TEL:0280-56-0567
 前橋支店 前橋市紅雲町 1-22-2 TEL:027-243-8241
 福島支店 福島市丸子字上六反田 14-12 TEL:024-552-1161
 上野支店 台東区北上野 2-3-11 TEL:03-3847-4511

世田谷支店 世田谷区用賀 2-14-11 TEL:03-5491-7595
 松戸支店 松戸市新松戸 3-366 TEL:047-345-3131
 千葉支店 千葉市中央区椿森 1-26-3 TEL:043-252-2288
 横浜支店 横浜市長区小菅ヶ谷 1-28-9-101 TEL:045-895-3803
 大宮支店 さいたま市見沼区東大宮 7-41-1 TEL:048-688-1740
 東大和支店 東大和市立野 3-640-1 TEL:042-590-5770
 盛岡営業所 盛岡市上堂 1-6-5 TEL:019-648-2777



みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%

WARM BIZ

株式会社岩瀬歯科商会は、「チームマイナス6%」に参加し、未来に向かって積極的に地球温暖化防止に取り組みます。

～ Present for you ～

<アンケートに答えてプレゼントを当てよう！>
 床用お掃除道具「フローリング床モップ」（スリーエム㈱）1本を5名の方にプレゼント致します

応募方法

別添ハガキに、必要事項およびアンケートの回答をご記入の上、ご応募下さい。
 当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。
 締め切り 2007年1月31日（水）消印有効



今年も早いもので師走の時期を迎えました。「師走」といえば大掃除ですが、日頃から整理整頓ができずに溜めた書類の山とパソコン内のデータを一掃するには、相応な時間を要するイベントになりそうです。この状態をクリアにすれば、年明けから効率よく新鮮な気持ちで仕事に取り掛かれるであろう・と実現にむけて只今計画中です。今号に大掃除コーナーがありすが、診療室の機械室は、「診療室の心臓部」と言う位重要なところですが、日頃時間をかけて見る場所ではありません。この機に少し時間を作り、点検・清掃すれば、機械も長持ちし、気持ちもすっきり、良い事づくめ？ かもしれない。今年一年の厄払いの意味も込めて、綺麗な診療室で新たな気持ちで新年を迎えてはいかがでしょうか？
 (Y A)

☆編集部から★



きかいしつチェックリスト

「機械室は、診療室の心臓部！！」この機会に目を向けてみませんか？

- | | | |
|--|-------|------|
| 1. 機械室は定期的に点検していない。 | Yes ? | No ? |
| 2. 機械室の点検の仕方が分からない。 | Yes ? | No ? |
| 3. 機械室の機器導入から10年以上経過している。 | Yes ? | No ? |
| 4. 最近、機械室から異音がする(音が大きくなった) | Yes ? | No ? |
| 5. 最近、バキュームの吸引が弱くなったと感じる。 | Yes ? | No ? |
| 6. 突然バキュームが止まることがある。(その後、自然に復帰する) | Yes ? | No ? |
| 7. 朝一に、バキュームの動作が不安定になるときがある。 | Yes ? | No ? |
| 8. ユニット側でバキュームを止めても直ぐにバキュームの吸引が止まらない。 | Yes ? | No ? |
| 9. バキュームを吸い始めると、他のユニットでも勝手にわずかに吸い始める。 | Yes ? | No ? |
| 10. バキュームやコンプレッサのベルトを1年以上交換していない。 | Yes ? | No ? |
| 11. バキュームやコンプレッサの予備ベルトを準備していない。 | Yes ? | No ? |
| 12. バキュームの排気フィルターを3年以上交換していない。 | Yes ? | No ? |
| 13. エアードライヤの点検を1年以上していない。 | Yes ? | No ? |
| 14. ユニットのシリンジのエアーに水が混ざることがある。 | Yes ? | No ? |
| 15. コンプレッサが頻繁に回る。 | Yes ? | No ? |
| 16. コンプレッサのオートドレンが正常に作動しているかどうか分からない。 | Yes ? | No ? |
| 17. 水抜きが必要なタイプのコンプレッサを使用しているが、最近水抜きをしていない。 | Yes ? | No ? |
| 18. オイルの補充が必要なタイプのコンプレッサを使用しているが、最近オイル残量のチェックをしていない。 | Yes ? | No ? |
| <機械室のことではありませんが・・・> | | |
| 19. 石膏トラップの掃除の仕方がわからない。 | Yes ? | No ? |
| 20. 石膏トラップのホースがひび割れしている。 | Yes ? | No ? |

※一つでも「YES」があった場合は、イワセ担当者へご連絡下さい。

歯科医院名

TEL

ご住所

イワセ担当者