

「新しい拡大の世界」

今や、マイクロスコープはエンド治療だけでなく、補綴やペリオ等幅広く臨床に応用されるようになりました。一方ハード面では新機種が続々登場し、幅広いラインナップから先生のニーズに合った機種選択が可能です。今回のイワセインフォメーションでは、そんなマイクロスコープの「今」と「拡大診療をすることでその先に見える世界」を、マイクロスコープユーザーの先生のインタビューを通してお伝えいたします。

マイクロユーザーインタビュー①

医療法人社団瑞祥会
いいづか歯科クリニック（千葉県印西市）
院長 飯塚真司先生・美景先生

飯塚先生は2012年1月にライカ M-320を導入されました。院長先生と奥様の美景先生に、使用した感想についてお聞きしました。

ライカ M-320

(ライカ)

ライカ M-320 (カメラ付き) は、動画や静止画を撮影できるようにカメラが内蔵されているため、フォルムが非常にシンプルでスマートです。



飯塚先生のコメント

鏡筒が重くならないので取り回しも非常に軽く、ストレスを感じません。足回りがしっかりしていて関節のバランスもよく、スタッフの往来が激しくても視野のブレは感じたことはありません。

特別なことではなく、普段の診療の延長上にマイクロスコープはあるんだと思います。

——マイクロスコープ導入の経緯を教えてください。

以前からルーペを使用していましたが、より精密な治療を患者さんに提供したいという思いからマイクロスコープ導入を決めました。ルーペと比べると、光の入射角が視線と一緒にであるため、複雑な湾曲根管でなければ根尖まではっきりと見ることができます。(図1)

見えづらいものを見ようとする目への負担は大きかったようで、マイクロスコープ導入後に肩の凝りがなくなったのは思わぬ副産物でした。現在はエンド治療をメインで使っていますが、今後はもっと幅広い診療に活用できそうです。

(図1) ルーペとマイクロスコープの比較

	診療姿勢	患部視野	アシスト	倍率
ルーペ	一般診療と同じ	直視できる	一般診療と同じ	1種類に固定
マイクロスコープ	一定の姿勢	ミラーテクニック	トレーニングが必要	変倍

——導入後、診療内容にどういった変化がありましたか。

例えば歯根破折による抜歯の場合などは、撮影した画像を見ながら説明することで、驚くほどスムーズに理解してもらえます。「破折しています」と自信を持って伝えられるので、総合的には治療回数やスパンが短くなったかもしれません。他にも、軟化象牙質の除去でも有効で、抜髄することが減っていますね。マイクロスコープで得られる精確な情報には、今までいかに手探りで診療していたかの事実を認識させられました。



ギモン解決！

インフォームドコンセント

飯塚先生は患者さんへの治療説明のためにマイクロスコープの画像を出力する際、ユニットに設置しているレントゲン用のモニターを活用されています。専用モニターを使わないのでスッキリしています。



※P.3でも詳しくご紹介いたします。

ただし、1回あたりの診療時間は以前よりも長くなりました。例えば、ガッタパーチャポイントの除去は今までの倍近い時間がかかってしまいます。しかしほぼ完全に除去できるため予後は非常に良いですし、歯根端切除の例でも、開口部を圧倒的に小さくすることができるため、患者さんの負担を大幅に軽減することができました。そのため、時間がかかるなど一般的にいわれているような問題点をデメリットとはあまり感じず、比較的すんなりと活用できていると思います。(院長先生)

今まではエンド治療に関して、なかなか取れないファイルの破折片など、諦めざるを得ない症例も多かったように思います。でもマイクロスコープを導入してからは、私自身が自信を持って患者さんの状態を断言し、精度の高い治療ができるなど、大きなメリットを感じています。おかげで、いつの間にかエンド治療が以前より好きになってきました。今後は症例の幅を広げ、使用頻度をどんどん増やしていきたいです。(美景先生)



マイクロユーザーインタビュー②

「もっとよく見たい、もっとよく知りたい」という欲求がより強くなっています。

医療法人社団愛一会
さくら歯科クリニック
(東京都練馬区)
院長 大橋武治先生

大橋先生は2008年3月にOPMI picoを導入されました。導入から5年が過ぎた現在の感想や、今後の展望についてお話をいただきました。

OPMI pico

(カールツァイス)

OPMI pico は、クリアで明るい拡大視野とエルゴノミックな診療姿勢を可能にします。鏡筒部分が 180 度の範囲で角度を調整でき、楽な姿勢で診療ができます。



大橋先生のコメント

視野のクリアさもですが、使いたい場所でピタリと止まるバランスアーム機構からくる取り回しのしやすさが決め手となったポイントです。

——導入後、どのような症例に活用されていますか。

最初は歯根破折やパーフォレーション等エンドの症例にマイクロスコープを使いたいと思い、伊万セの担当者に相談しました。

それから5年経ち、現在は外科、補綴、ペリオ等、デンチャー以外のほとんどの症例に活用しています。まるで歯根の中に自分が立って周りを見渡しているような感覚で、今は私の「目」としてなくてはならない存在になっています。2台目の購入を考えているので、次はより明るいライトを搭載しているものにしようと思っています。

——使いこなすまでどのくらいかかりましたか。

思いつくすべての診療に対して使用してきたため、慣れるまでの時間は短かったかもしれません。ただし、ミラーテクニックの習得には1年ほどかかったと思います。セミナーに参加したり、抜去歯をセメントで固めたものやナート練習用のラバーシートなどを使い、技術の向上に励みました。

目が疲れるという話はよく聞きますが、長時間覗きっぱなしということはあまりないので、そんなに負担は感じていません。

——アシストに関して何か指示していることはありますか。

私が治療域に集中できるよう、バキュームやライティング、舌の位置管理等を考えて動いてもらっています。また、患者さんが動いてしまうのをなるべく防ぐため、患者さんへの声掛けは必要最低限に抑えるよう指示しています。

マイクロスコープ使用時に便利なツール

スプラソンP-MAX専用チップ

『サテレック
エンドサクセスチップ』(白水貿易)



「マイクロスコープとの併用でより的確に破折片に当てることができます。」(飯塚先生)

【定価】
◆単品 10,000 円 (税別) から
◆セット 77,300 円 (税別)

口腔内疑似粘膜

『オペトレーナー』(松風)




大橋先生もこのような器材を使ってトレーニングを積まれたそうです。

【定価】2,000 円 (税別)

ガッターパーチャリムーバー

『GP リムーバースピアー』(YDM)

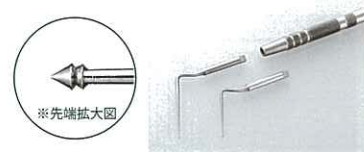

鉗(もり)状の先端形状により、根管内に残存する細かなガッターパーチャを効率よく除去できます。

【定価】
◆GP リムーバースピアー (ポイント式) 3,300 円 (税別)
◆P-C ハンドルポイント式用 2,500 円 (税別)

ガッターパーチャ除去用ファイル

『ガッターパーチャリムーバー』(マニー)



簡単な2ステップで、より速く、より簡単に、より効率よく除去が可能です。

【定価】各4本入
◆1S・2S 各2,100 円 (税別)
◆3N・4N 各4,200 円 (税別)

マイクロスコープ ハンズオンセミナーのご案内

導入後のミラーテクニック習得や、臨床での幅広い活用を実現するために・・・

石井歯内療法研修会

■講師 石井 宏先生
■日程 2013年6月8日(土) & 9日(日)
■会場 東京都内
■問合せ 石井歯内療法研修会事務局

マイクロスコープの臨床応用

■講師 岡田 守雄先生
■日程 2013年4月14日(日)
■会場 ㈱ジーシーコーポレートセンター
■主催 株式会社ジーシー

マイクロエンドセミナー実習会

■講師 井澤 常泰先生
■日程 2013年4月6日(土) & 7日(日)
■会場 白水貿易(株)関東研修サービスセンター
■主催 白水貿易株式会社

日本顕微鏡歯科学会 第10回学術大会
2013年3月30日(土)・31日(日)
会場：一橋大学一橋講堂

Dr+DH
ペア参加
アシスタントワーク
実習できます♪

最新ラインナップ

▶ ハイエンドモデル

OPMI PROergo

(カールツァイス)

【標準価格】7,640,000 円 (税別) より



- ・半世紀にわたって手術用顕微鏡を開発してきたカールツァイス社の技術の結晶
- ・フリーフロートマグネティック機能で宙に舞う羽のように鏡筒をどんな位置にもスムーズに移動可能
- ・電動ズーム機能を標準搭載

アレグラ 500

(メーラー)

【標準価格】LED仕様: 8,800,000 円 (税別) より



- ・軽快で正確な操作感を実現したドイツメーラー社の歯科用最上位機種
- ・電動フォーカス、電動ズーム、ライト調光を手元スイッチで調整可能
- ・鏡筒の動きを制御できる電磁ブレーキシステムを採用で思いのままのアーム操作

※機能を絞って価格を抑えたタイプ(アレグラ330)もご用意します。

▶ ミッドレンジモデル

ライカ M-320

(ライカ)

【標準価格】カメラ付き: 4,500,000 円 (税別) より
カメラ無し: 4,000,000 円 (税別) より



- ・ハイパワー LED のダブルビーム照明ハロゲンライトに比べて明るく長寿命
- ・最大 100,000Lux の明るさで高倍率でも明るい視野を確保
- ・ハイビジョン撮影が可能なカメラをオプションで内蔵可能

OPMI pico

(カールツァイス)

【標準価格】3,000,000 円 (税別) より



- ※1 Tマルチコートアポクロマートレンズ搭載で明るくクリアな視界
- ・見たいところでピタリと止まるバランスアーム
- ・MORA インターフェイスを搭載すれば直視領域を拡大可能

※1 カールツァイス社独自の技術。レンズの表面反射を減らし、透過率を上げ、色の再現性を高めるコーティング法。
※2 色の波長の違いによる像のにじみ(色収差)を補正する色消しレンズの一種。3色の色収差を補正できるものがアポクロマートと呼ばれ最上等級に分類される。

▶ エントリーモデル

プリマ DNT

(ラボメッド)

【標準価格】1,780,000 円 (税別) より



- ・LED ライトを標準装備、アポクロマートレンズを採用で驚きの価格を実現
- ・光源がアーム内収納のため外観がスマート
- ・スタンドベース部分がコンパクトなため設置場所を選ばない

ブライトビジョン

(ペントロンジャパン株式会社)



グローバル

(タカラベルモント株式会社)




各機種デモが可能です。ぜひ実際に触って使用感をお確かめください。詳細は弊社営業スタッフまでお問い合わせください。

※全ての機種の標準価格にオプション代金等は含まれません。

撮影した画像や動画を使った

インフォームドコンセント活用法

撮影した画像や動画の出力・管理には、以下のように様々な方法があります。

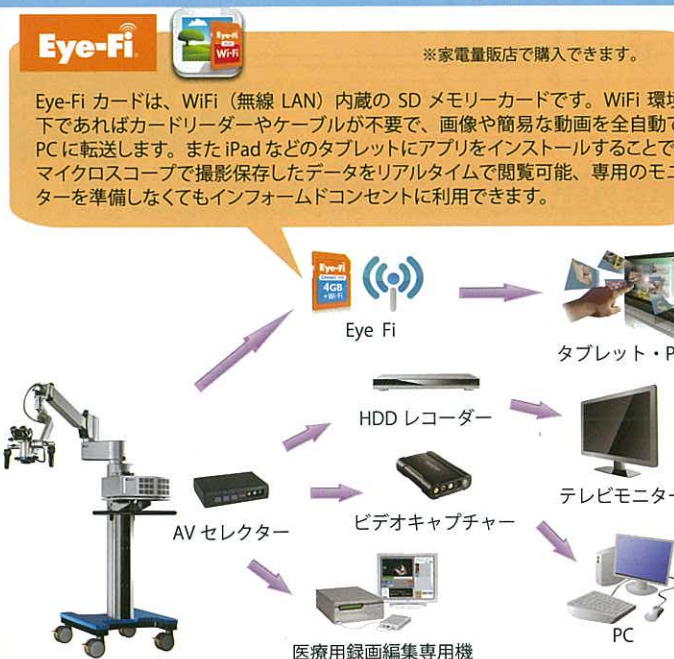

	Eye Fi	HDD レコーダー	ビデオキャプチャー	録画編集専用機
高画質録画	△ MPEG 形式が一般的。容量に注意。	◎ MPEG 形式、プログレッシブ動画。圧縮率が高いにも関わらず高画質。	△ 多くは MPEG 形式。インターレース動画。高圧縮で画質劣化。	○ DV 形式、インターレース動画。非可逆圧縮。高圧縮で画質劣化。
記録容量	△ 4~16GB	◎ 500GB~2TB	— PC の HDD 容量による	○ 500GB (約 40 時間録画可能)
静止画のキャプチャー	○ JPEG 形式等	× 録画は動画のみ	◎ 録画中に静止画保存が可能	◎ 録画中に静止画保存が可能
音声録音機能	△ 機種により可能	× 音声録音不可	△ 機種により可能	× 音声録音不可
パソコンでの編集	○ 簡単。ネットワーク環境によりスピードに変動があるが自動的に PC へ転送。	△ 画面。データ圧縮率が高く PC 編集でさらに劣化する。	△ 可能だが、圧縮率が高いので画質が劣化する。	○ 互換性の高い低圧縮な MS-DV 形式のため編集可能。ただし非可逆圧縮。
操作性	△ 使用するカメラ機種による	△ リモコン操作のみ。ブラインド操作は不可。	△ マウスやキーボード操作のみ。ブラインド操作は不可。	◎ フットペダルやタッチパネル操作で治療中に扱いやすい。
モニター出力	○ PC・タブレット側で再生。サイズによって速度が変化する。	○ 遅延なくモニターに出力できるが PC モニターに非対応な機種が多い。	△ 外付デジタル変換のモニターに接続する必要がある。	○ 外付デジタル変換のモニターに接続する必要がある。
設置スペース	◎ カメラ内蔵スロット	△ やや大きい	◎ とても小さい	× 大きい
可動性	◎ データの移動も簡単	× 移動は困難	◎ 持ち運び可能	△ 移動には不向き
価格	◎ 数千円から	△ 5万~15万円。HDD 容量にもよる。	◎ 数千円から	× 100 万円前後
導入の難易度	◎ 量販店で購入可能	◎ 簡単操作で初心者でも扱える	○ PC にソフトをインストールして接続するだけ	◎ 簡単操作で初心者でも扱える
多彩な機能・設定	—	—	—	○ 患者管理ソフト付き

歯科用開創器

(石井)

ISHII リトラクター (KLSマーチン)

石井 宏先生考案！
マイクロスコブ使用時に使いやすい！

歯内療法分野で活躍されている石井宏先生のご考案されたリトラクターです。マイクロスコブ下で行う歯内療法外科に適した形態が付与してあり、組織をしっかりとリトラクトすると同時に、マイクロスコブの視野を妨げないよう設計されています。また、先端はわずか 0.4mm と非常に薄く、すべらずにしっかりと固定し、低侵襲を可能にします。長時間保持しても疲れにくい中空ハンドルです。



【定価】全4形態
1本入：各 28,000 円 (税別)
4セット：100,000 円 (税別)

歯科根管用ポスト成形品

ツインルーセントアンカー (デンタータス)

デンタータスから満を持して
ファイバーポストが新登場！



スクリーポストで有名なデンタータス社から、ファイバーポストが新登場です。ポストと専用リーマのサイズが一致なので、歯根とポストの一体化、治療時間の節約を実現します。また、弾性係数が象牙質と近似しているため、歯のたわみに応じて屈曲しながら応力を分散し、歯冠と歯根への負担を軽減します。形状はスタンダード・タイプとツイン・タイプの2種類があり、特にツイン・タイプはその独特な形状の各部位が優れた機能を発揮します。

◆アソートセット ※単品包装もございます。

【内容】ポスト (XS・S・M) 各5本入・コアフォームフィット (小・中・大) 各5個入
【定価】スタンダード・タイプ：10,000 円 (税別) / ツイン・タイプ：11,500 円 (税別)

歯面コーティング材

アイコン Icon (DMG)

『アイコン』は低粘度の光重合型レジンです。初期う蝕の部位をコーティングすることで、酸によるエナメル質の脱灰を防ぎ、う蝕の進行を阻止します。

Icon は、こんな場合に使えます。



PRODUCTS SELECTION

歯科用コンポジットレジンセメント

インプラントセメント (プレミア)

インプラントに最適なセメント！



レジンセメントの強度と耐久性を有した『インプラントセメント』は、インプラント修復物を長期的に維持するだけでなく、必要なら接着した修復物を簡単に外すことも可能です。前処理は必要なく、必要な量をピンポイントで使うことができます。また、硬化したセメントは弾性があるため、咬合圧を吸収する度合いが優れています。

【内容】オートミックスシリンジ 5mL×1本、オートミックスチップ×10個、練板紙×1部

【定価】7,900 円 (税別)

歯科用根管充填シーラー

メタシール Soft (サンメディカル)

簡単操作で確実な接着根充が可能に！

根管象牙質へ確実に接着し、根管全体を緊密に封鎖する接着性レジン系シーラーが新発売されました。粉液を練和して充填するだけの簡単な操作方法で、セットに付属しているエンドノズルを使うとより容易に充填できます。

また、セルフエッチング能を有しているため専用の前処理材は不要で、親水性のシーラーであるために、湿潤した根管象牙質でも良好な接着性能を得ることができます。さらに、レジン系でありながら硬化後も軟質な物性を保ち、万が一の再根治でもファイルやリーマー等で容易に除去が可能です。



【セット内容】リキッド (3.5mL) 1本、パウダー (5g) 1個、スパチュラ 1本、練和紙 1冊、遮光カバー 1個、メタシール Soft スプーン 1本、エンドノズル (ノズル・プラグ・ストップリング) 各10個

【定価】11,000 円 (税別)

Pick Up

Only one product in the world!
削らずに治療する、夢のような材料が登場！

Icon は、2種類のチップがあります。



アイコン - スムースサーフェイス (歯面用)



アイコン - プロキシマル (隣接面用)

効率的なコーティングが可能!!



※セット内容など詳細は弊社営業スタッフまでお問い合わせください。

今年の夏!! 開催決定! Coming Soon!

第4回ナショナルカムログシンポジウム

2013年 7月14日 (日)
7月15日 (月祝)

東京コンファレンスセンター・品川

テーマ：検証！
～インプラント臨床を科学する～
Longevity, Accuracy, Safety

Check!
ほいんと!

～患者利益のための知識共有を図る場所～

■ドクターセッション

国内外のエキスパート21名が登場。(以下順不同)

※海外演者：S-Marcus Beschmidt先生、Claudio Cacaci先生、Katja Nelson先生
※国内演者：皆川 仁先生、小池軍平先生、貞光謙一郎先生、松本勝利先生、森田潤先生、室木俊美先生、宇毛 玲先生、大島俊之先生、中島和敏先生、梅田和徳先生、田嶋 健先生、樹屋順一先生、藤波 淳先生、津久井明先生、飯田正人先生、鈴木光雄先生、中田光太郎先生、山本尚吾先生
外科、補綴、メインテナンス、基礎研究それぞれの立場から、最前線の臨床や裏付けとなる最新のリサーチ情報があります。

■テクニシャンセッション

今回初めて海外演者 Stachulla氏 (Cacaci先生の技工を担当) が登壇。また、山本尚吾先生による審美補綴と写真撮影テクニック講座を企画。サージカルガイドの設計製作についてドクターとテクニシャンとの連携ポイントはどこにあるか等「CAMLOGの補綴・技工」についてベシク及び、最新の情報もあります。

■ハイジニストセッション

臨床に即した実践的な内容となる「インプラントアシスタントワークとメンテナンスケアの今」についてハイジニスト7名のスペシャリストによるセミナー企画あり。ドクターが考えるインプラント臨床についてコディナルスタッフ全員が理解を深めるためのワークショップを開催します。

プレコンgres=ハンズオンワークショップ

※7/14 (日) 10:00～12:00 別途お申込、費用が必要です。詳細お問い合わせ下さい。

パネルディスカッション

メーカー/企業展示

ポスターセッション

詳しくは、弊社営業スタッフまでお問い合わせ下さい！

チケットは超早割 (4/20まで) が断然お得!

「カムログシンポジウム」の歴史は、まだ浅く2006年が始まりです。「サイエンス」と「エデュケーション」の交わる最高峰のステージとなる、ICC (インターナショナルカムログシンポジウム) とNCC (ナショナルカムログシンポジウム) が世界各国で開催されています。2年前に日本で開催されたNCCも全国各地から延べ563名もの先生方が一堂に会し、大いに盛り上がりしました。今年の夏、日本で開催するNCCも魅力的な企画が多く、期待が持てます。今回のテーマは「検証」です。氾濫する様々な材料、機器、テクニック、コンセプト等についてドクターやコディナルスタッフが「いったい何が正しくて、どれが最も有効で信頼性があるのか」といったお悩みを解決すべく、斬新で新しい情報を初めて提供するのではなく、これまでの情報を再考することで医療従事者の情報整理は勿論、よりよい患者利益を情報・知識共有ができることを目的としています。

海外、特にヨーロッパなどでは、「長期安定性 (Longevity)・確実性 (Accuracy)・安全性 (Safety)」の更なる向上のために既出の研究や評価を大切にしているというマインドが定番となっておりますが、今回のNCCはこうしたマインドを反映し、より有効な患者利益となり得る貴重な情報共有の機会を多く設けております。参加チケットは、商品とのパッケージプランや特別早割、特別割引チケットをご用意しております。どうぞこの機会に歯科医院さま全員でチーム医療の情報共有の場としてご利用されてはいかがでしょうか。

キャンペーン期間

2013年2月21日～6月20日まで



SEMILAR=Information

皆川仁先生インプラントアカデミー
対象：歯科医師様

インプラント治療に重要な解剖学に始まり、診査・診断やサージカルガイド設計、補綴設計～咬合学についてなど、インプラントに関する全てが基礎からがっちり相互実習で習得できるコースです。皆川先生のオフィスで行う内容もあり、患者さんへのコンサルノウハウまで習得できる人気のひとです。

SEASON1/全12回コース

★毎月・日曜開催
①5/12 ②6/30 ③7/7 ④8/4 ⑤9/1 ⑥9/18 ⑦10/6 ⑧10/20 ⑨11/3 ⑩12/1 ⑪2014/1/12 ⑫2014/2/5

SEASON2/全12回コース

★毎月・日曜開催
①10/20 ②11/17 ③12/15 ④2014/1/19 ⑤2/23 ⑥3/23 ⑦4/20 ⑧5/18 ⑨6/15 ⑩7/20 ⑪8/10 ⑫9/21

会場：岩瀬歯科商会 上野支店研修ルーム

カムログインプラント M.I コンセプトセミナー 3days
対象：歯科医師様

Camlog インプラントのシステムと使いこなし法からインプラント治療の外科～補綴までトータル治療の流れを学ぶことができます。このほかスタッフとのアライニングや患者との情報共有方法、オペ前の準備等細かい点でのレクチャーが好評です。

○第1日目/診査診断、基礎知識
10月27日 (日) 10:00～17:00

○第2日目/外科テクニック (豚実習)
11月17日 (日) 10:00～17:00

○第3日目/補綴設計、マテリアル等
12月15日 (日) 10:00～17:00

会場：岩瀬歯科商会 上野支店研修ルーム

●講師
梅田和徳先生
(東京都開業)

●受講料
¥105,000 円
(税込)

シャープニング実習セミナー
対象：歯科衛生士様

シャープニングの基礎を少人数のハンズオンでじっくり体得できるセミナーです。岩瀬歯科商会の歯科衛生士が、丁寧で解りやすいレクチャーを心がけ、毎回ご参加された方々に満足いただいております。

4月18日 (木) 10:00～

5月16日 (木) 10:00～

6月27日 (木) 10:00～

8月1日 (木) 10:00～

●受講料：¥3,150 円 (税込)
●定員：10名
●会場：岩瀬歯科商会 上野支店研修ルーム

弊社営業スタッフまでお問い合わせ下さい！

このコーナーでは、弊社歯科衛生士の岡崎みなみがハイジニストの皆さんへのお役立ち情報をお届けしていきます！

第3回

ハndsケーラーを知ろう！ ～ユニバーサルキュレット編～



歯科衛生士／岡崎みなみ


造・特徴を改めて知り、「臨床で使ってみたい!」と感じましたので、ほんの一部ですがご紹介致します。

ポイント① ユニバーサルキュレットとグレイシーキュレットの違い

ユニバーサルキュレットは第一シャンクに対してブレードのフェイスが 90 度に面しており、両刃のカッティングエッジです。(図1右側参照) 両刃ですが、歯肉縁下への挿入角度を第一シャンクを歯面に対して約 20 度傾けることで、ブレードの湾曲が歯面にフィットしやすいので、歯周組織を傷つける心配はありません。

ユニバーサルキュレットの操作方は、歯の中心に向けて力を加え、作業角度を操作しながら使用します。側方圧をかけて引き上げるグレイシーキュレットと作業面への圧のかかり方が違います。

図1 比較図

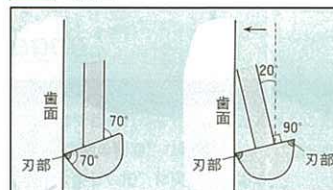

グレイシーキュレット ユニバーサルキュレット
出典:『教本 歯科予防処置』

図2 ブレードの形状の違い



グレイシーキュレット



ユニバーサル#13-14

ポイント② ブレードのカーブが隅角部にフィットしやすく、効率よいSRPが可能

ユニバーサルキュレットはブレードの湾曲が歯面に沿う形状のため、隅角部や小臼歯などの根面溝にもフィットしやすくなります。グレイシーキュレットで同じように隅角部をデブライドメントする場合、刃部が根面から浮き上がり歯肉に負担をかける可能性があります。(左図2参照) また、歯根カーブとブレードカーブとを上手にフィッティングできれば、ほとんどの部位を効率よくデブライドメントすることもできます。例えば、ユニバーサルキュレットの#13-14でグレイシーキュレット#1～12が代用可能です。使用可能な範囲は図3の赤いラインで示した部位です。

図3

使用可能な部位


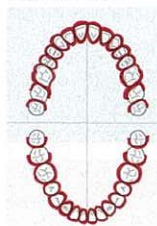


図4

ユニバーサルキュレットの形状比較



『YDM』『ヒューフレディ』『LM』

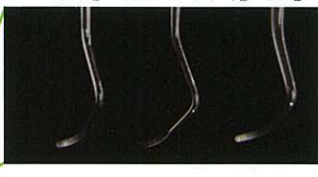

各社によってブレードの幅や形状が少しずつ違いますので、ぜひ一度、購入前に見本品をご覧ください。(図4参照) 弊社営業スタッフまでお気軽にお問い合わせください。

参考資料:

加藤久子: 第5回スケーリングにまつわるギモン。デンタルハイジーン2012年8月号, 785, 2012.
長谷ますみ: ユニバーサルキュレットを使いこなそう。DH style2010年9月号, 42-47, 2010.
沼部幸博監修: 新人歯科衛生士のためのペリオドンインストメンテーション。クインテッセンス出版, 2008.
風見健一: 歯周治療を成功させるための正しいスケーラー選択。歯界展望2008年5月号, 2008.

各支店ご案内

本社	台東区台東2-23-7	TEL:03-3832-8241
宇都宮支店	宇都宮市平出工業団地37-6	TEL:028-613-5858
水戸支店	水戸市白梅2-8-18	TEL:029-225-6543
松戸支店	松戸市幸谷観音下159-1	TEL:047-345-3131
千葉支店	千葉市中央区浜野町879-1	TEL:043-305-1182
上野支店	台東区台東2-23-7	TEL:03-3832-8241
古河支店	古河市下山町9-60	TEL:0280-30-1582
福島支店	福島市丸子字上六反田14-12	TEL:024-552-1161
世田谷支店	世田谷区玉川台2-11-17-101	TEL:03-5491-7595
練馬営業所	練馬区豊玉北4-14-11	TEL:03-5912-1180
横浜支店	横浜市栄区小菅ヶ谷1-28-9-101	TEL:045-895-3808
前橋支店	前橋市紅雲町1-22-2	TEL:027-243-8241
厚木支店	厚木市酒井2087-14	TEL:046-228-5550
大宮支店	さいたま市見沼区東大宮7-41-1	TEL:048-688-1740
盛岡支店	盛岡市上堂1-6-5	TEL:019-648-2777
東大和支店	東大和市立野3-640-1	TEL:042-590-5770

Iwase Dental Show 2013



宇都宮デンタルショー

6月22日(土)・23日(日)



東京デンタルショー

7月27日(土)・28日(日)

を踏み出す季節。新しい制服とともに次のステップに羽ばたきます。それが社会へ出て幾年月、この時期と言えは激しい気温差と恐怖の花粉。4月の区切りが薄れているそんな自分、これではいけないと活を入れる為、先ず営業の制服であるスーツの新調から始めました。それだけで気分が新たにやる気も出てくるものです。歯科医院様におかれましては、ユニフォームの一新というのも心機一転につながるかもしれません。この春には岩瀬歯科商會にも新人が入ります。早く先生方のお役に立てます様、取り組まない点が、何卒よろしくお願ひ申し上げます。(N)

編集後記

新年度スタート。4月3日は新月。たなは新



みんなで止めよう温暖化

チームマイナス6%

株式会社岩瀬歯科商會は、「チームマイナス6%」に参加し、未来に向かって積極的に地球温暖化防止に取り組みます。